


## Auswahl der richtigen Größe der Manschetten und der Elektrodenposition

Die Manschetten sind in drei Größen erhältlich:  
**Small, Medium und Large.**

1

Messen Sie Ihren Hüftumfang an der breitesten Stelle, wie es hier abgebildet ist.

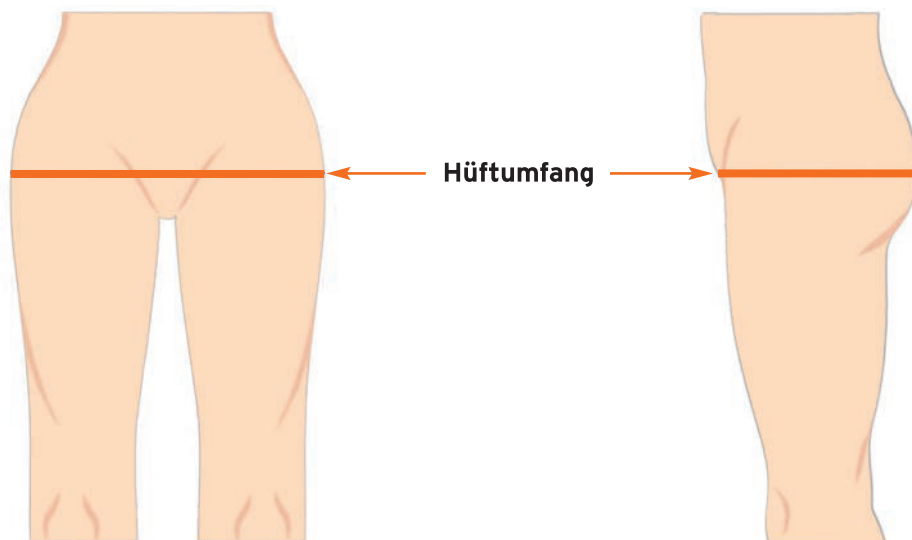


2

Verwenden Sie diese Tabelle zur richtigen Auswahl der Manschettengröße und der Elektrodenposition A oder B.

### GRÖßENTABELLE

Hüftumfang	Größe	A or B
86.3-97.5cm	S	<b>A</b>
97.6-107.7cm	S	<b>B</b>
107.9-116.6cm	M	<b>A</b>
116.8-121.7cm	M	<b>B</b>
121.9-124.6cm	L	<b>A</b>
124.7-127cm	L	<b>B</b>

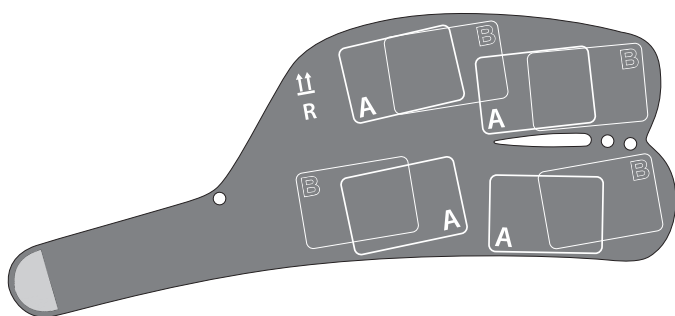

Bitte lesen Sie nun die ausführliche Gebrauchsanweisung und die Kurzanleitung. Das Anleitungsvideo finden Sie unter [www.neurotech-vital.de](http://www.neurotech-vital.de)

neurotech Vital GmbH  
In Oberwiesen 9  
88682 Salem

**Telefon** +49 7553 590 990-00

**Telefax** +49 7553 590 990-50

**E-Mail** [info@neurotech-vital.com](mailto:info@neurotech-vital.com)

**Web** [www.neurotech-vital.com](http://www.neurotech-vital.com)