

www.neurotech-vital.de



Anwendungsgebiete:

- Belastungsinkontinenz
- Dranginkontinenz (Training des Detrusormechanismus)
- Mischinkontinenz
- Rehabilitation der Beckenbodenmuskulatur

Vorteile auf einen Blick:

- zur Behandlung von Belastungs- und Dranginkontinenz
- Therapie ohne Einführelektroden
- einfach in der Handhabung, angenehm zu tragen
- Ideal für die Therapie daheim
- Die Manschetten sind in den Größen S, M, L erhältlich und für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet:

Konfektionsgröße Damen	Konfektionsgröße Herren	Hüft-/Gesäßumfang	Manschettengröße	Elektrodenposition
ca. 30/32	ca. 46	78,7 – 87,6 cm	S	A
ca. 34/36	ca. 48	87,7 – 96,5 cm	S	B
ca. 38/40	ca. 50/52	96,6 – 105,4 cm	M	A
ca. 42/44	ca. 54	105,5 – 114,3 cm	M	B
ca. 46/48	ca. 56	114,4 – 122,6 cm	L	A
ca. 50/52/54	ca. 58/60+	122,7 – 130,8 cm	L	B

+ NEUROTECH VITAL™ – Einfach. Angenehm. Von außen.

NEUROTECH VITAL™ ist ein Therapiegerät zur Behandlung von Inkontinenz. Es vereint elektrische Muskelstimulation (EMS) und Biofeedback und bietet verschiedene Therapieprogramme zur Behandlung von Belastungs-, Drang- und Mischinkontinenz.

Bei der Behandlung der Belastungsinkontinenz erfolgt die Stimulation über zwei textile Manschetten, die rechts und links unterhalb der Hüfte am Oberschenkel platziert und mit Klettverschlüssen fixiert werden. Die Manschetten verfügen über je vier großflächige Elektroden, die dank patentierter multipath™-Technologie die Beckenbodenmuskulatur effektiv stimulieren und die Kontraktionsfähigkeit unterstützen.



multipath™-Technologie: Alle verfügbaren Elektroden sind in ständiger Verbindung zueinander, wodurch sämtliche Impulse in wechselndem Rhythmus von einer Körperseite zur anderen gelangen. Es wird eine schnelle und großflächige Wirkung erzielt. Die Muskelfasern werden in kurzer Zeit aktiviert.

NEUROTECH VITAL™ eignet sich auch zur Behandlung von Dranginkontinenz. Mit einer speziellen Schmetterlingselektrode, die im unteren Rückenbereich (S1–S3) angelegt wird, werden die Sakralnerven stimuliert und so die Überaktivität der harntreibenden Muskeln herabgesetzt.



Hoher Therapiekomfort

Die Anwendung mit NEUROTECH VITAL™ ist einfach und angenehm. Die textilen Manschetten mit den integrierten Klebeelektroden reduzieren Fehler in der Anwendung und machen das Verwenden von Einführelektroden überflüssig.

+ Für Fragen oder weitere Informationen:

BMR Health GmbH
In Oberwiesen 9
88682 Salem

SERVICEHOTLINE +49 7553 59 09 90 - 00
FAX +49 7553 59 09 90 - 50
E-MAIL info@bmrh.de
WEB www.bmr-health.de